


# 検便の取り方について

正確な検査を行う為に下記の便採取説明及び注意書を参照の上、所定の容器に採取して下さい。

図 1

## 便採取説明

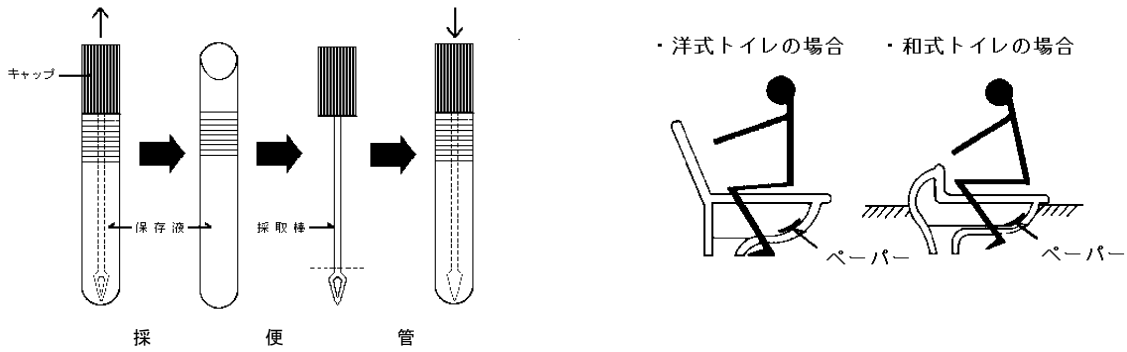

- (1) キャップを↑の方に抜いて下さい。
- (2) 採取棒と保存液（ゼリー状）入り容器にわかれず。
- (3) 採取棒を便に-----の深さまで **2、3ヶ所** 軽く突き刺して下さい。
- (4) 採取棒に便が付着しているのを確認して下さい。
- (5) 抜き取った採取棒を保存液の入った容器にパチッと音がするまで押し込んで下さい。

## 注意書

- ※ 図 1 のように洋式トイレは後ろ向きに、和式トイレは後ろの方で、出来るだけペーパーが水に浸からないようにして下さい。
- ※ 図 2 のように適量を採取し、キャップの締め忘れ等がありませんようにご注意して下さい。
- ※ 高温及び直射日光下で保存しないで下さい。
- ※ 保存液は便採取後 3 日～7 日間位便に変化が起きないように調合されておりますが、採取後は速やかに提出して下さい。

図 2

