

# 대변 샘플을 수집하는 방법

정확한 검사를 수행하기 위해 다음 항공편 채취 기입란이나 비고란을 참조하여 소정의 용기에 채취합니다.

그림 1

캡  
보존액  
채취 봉

대변 채취 용기

· 서양식 화장실 · 일본식 화장실  
종이 종이

- (1) 화살표 방향 (↑)에 캡을 분리하십시오.
- (2) 시료 낚시대와 보존액이 담긴 용기 (젤리)으로 나누어져 있습니다.
- (3) 대변에 시료 채취 봉 선 (-----) 깊이까지 2 ~ 3 번 찢어주세요.
- (4) 시료 채취봉에 대변이 부착되어 있는지 확인하십시오.
- (5) 시료 채취 봉을 보존액이 들어있는 용기에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

## 주의 서

- 그림 1 과 같이 서양식 변기는 반대 방향으로 앉아 일본의 화장실은 뒤에 방향으로. 종이가 물에 젖지 않도록하십시오.
- 그림 2 와 같이 적당량을 채취합니다. 캡은 위치 조여주십시오.
- 고온이나 직사 광선 아래에서 저장하지 마십시오.
- 보존액이 들어 있기 때문에 채취 후 3 ~ 7 일 정도는 안정적이지만, 최대한 빨리 제출하십시오.

그림 2

×      ○      ×

적은      적당량      많은